


Instruções para execução do teste rápido para Covid através do kit SARS-CoV-2 Ag InviTest

COLETA DE AMOSTRA


Swab de Nasofaringe: Incline levemente a cabeça do paciente e insira a ponta do swab (até 2,5 cm da borda) na narina. Role o swab 5 vezes ao longo da mucosa dentro da narina. Com o mesmo swab, repita esse processo na outra narina.

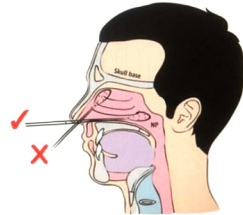


TÉCNICA - SWAB DE NASOFARINGE




1 - Adicione 6 gotas do Diluente (DIL) no Tubo de Extração (TUBE).

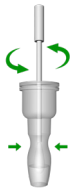

2 - Após coleta, coloque o Swab (SWAB) dentro do Tubo de Extração. Segure firmemente o Tubo de Extração e pressione a cabeça do swab contra a parede do tubo, enquanto gira o swab por cerca de 10 segundos para liberar o antígeno na solução de diluente presente no tubo de extração.

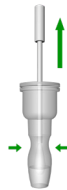

3 - Remova o swab, apertando o Tubo de Extração contra a cabeça do swab para remover o máximo de líquido possível do swab. Descarte o swab.

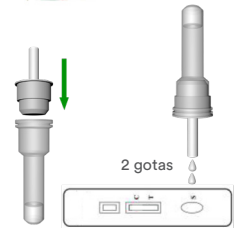


4 - Coloque a tampa de bico no Tubo de Extração e dispense 2 gotas da solução no poço de amostra do Cassete (TEST).




5 - Aguarde 20 minutos para interpretação dos resultados. Não interprete o resultado após 30 minutos.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

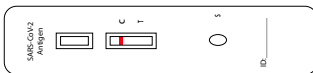

Negativo / Não Reagente


Aparece somente a linha Controle (C).

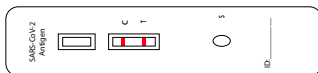

Positivo / Reagente

Aparece a linha Controle (C) e a linha Teste (T).

A intensidade da linha de teste pode ser menor que a da linha de controle, o que ainda significa resultado positivo.

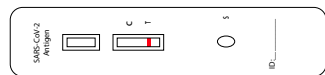

Inválido

Caso a linha de controle (C) não esteja visível, pode ter ocorrido falha no teste, volume de amostra insuficiente ou o procedimento não foi seguido corretamente. É necessário que o teste seja feito novamente em um novo dispositivo.

A intensidade da cor vermelha na região da linha de teste (T) poderá variar dependendo da carga viral presente na amostra. Portanto, qualquer tom de vermelho na região de teste (T) deve ser considerado positivo.

Obs: Para realização da técnica com outro tipo de amostra, vide Instruções de Uso do produto. Para mais informações, acesse: invitrocovid19.com.br